

清掃効果プラス、使いやすさを追求。

〈バトラー イージースレッドフロス〉



商品名	タイプ	仕様	販売単位	患者様希望価格
バトラー イージースレッドフロス	アンワックスタイプ	50回分	6個	1個(50回用) 900円 (税抜)

続けやすい! 1本あたり50円の歯間ブラシ



ガム・プロズ歯間ブラシL字型

サイズ	ブラシ寸法(mm)	最小通過径(mmΦ)	販売単位	患者様希望価格
SSS(1)	2.0 ≡ 2.1 └10.0┘	~0.8	1ダース 12個入 (1個:4本入)	1個 200円 (税抜価格)
SS(2)	2.1 ≡ 2.6 └10.0┘	0.8~1.0
S(3)	2.1 ≡ 3.6 └10.0┘	1.0~1.2
M(4)	2.9 ≡ 4.8 └12.0┘	1.2~1.5	1箱 50本入	1個 2000円 (税抜価格)
L(5)	3.0 ≡ 6.3 └12.0┘	1.5~1.8		

●プラスチック(ポリエチレン)製 ●耐熱温度:約80℃ 「サイズ表記は全日本ブラシ工業協同組合による通過径の自主規格に基づくものです」
●<抗菌部位:毛、抗菌剤:クローロヘキシジン>

製品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号
TEL:072-682-4733
FAX:072-684-5669

©登録商標 BUTLER は登録商標です。

2019.1

SUNSTAR

医療機関向

フロスの
わずらわしさ **解消!**

からまない × 通しやすい



歯科衛生士
いち押し

オシャレで
コンパクトなケース

多彩な機能が詰まった
糸通し付きフロス

BUTLER

バトラー イージースレッドフロス







専用ケースから 1本ずつ切り離す ので、絡まない! 糸通し部が付いて、挿入しやすい機能的なフロスです。✦✦

Point 1

1本に緑と白の2つの役割! つい使ってみたくなるフロス

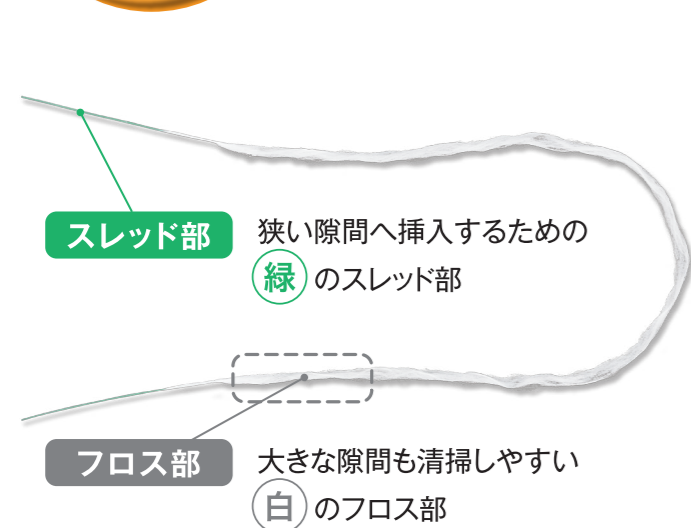


硬めでスツと通せる! **糸通し(スレッド部)付き**

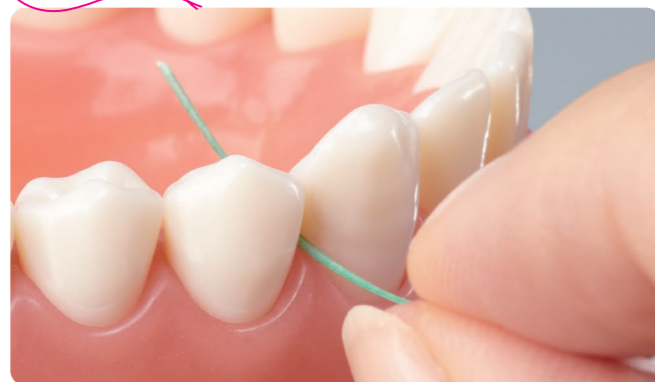

しっかりとしたスレッド部により、
歯間などにスムーズに差し込むことができます。

汚れがよく落ちる! **特殊ナイロンフロス**
フロス部の長さ:約35cm

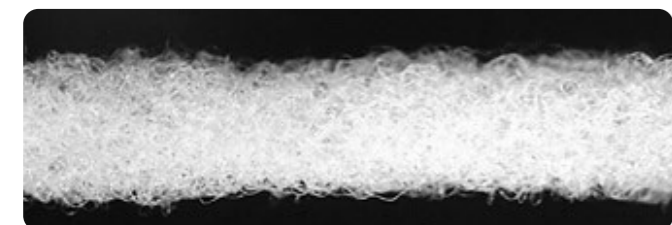


膨らんだフロスが歯間部やインプラント装着部にフィットするため、プラークをより効果的に除去することができます。

唾液で膨張し、
多数の繊維が汚れをかき取ります。



除去率約**70%** お口の中で膨らむフロスが**プラークを除去!**

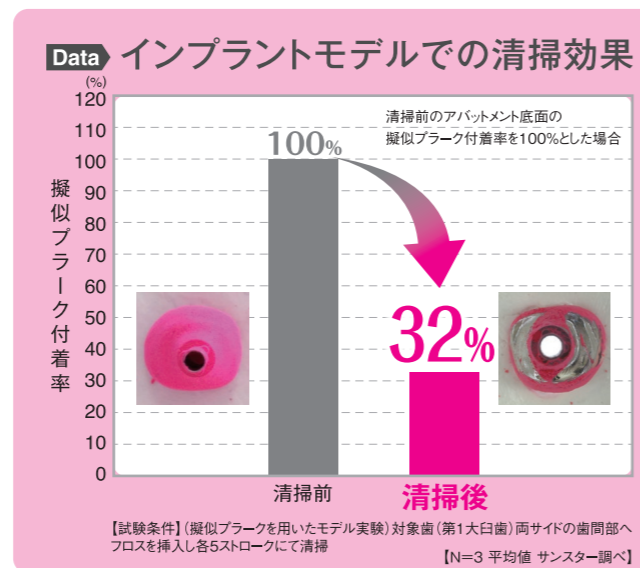

Point 2

持ち運びに便利なサイズ! 衛生的にも安心なケース入り



残量も見える!

スレッド部で**1本ずつ切り出して**使用します。

※フロス引き出し時・カット時は透明窓部を押さえないでください。



出しすぎてもOK!

巻き戻し機能付き

※フロスが入り込んだ際は、フロスカスを開けて、フロスを出してください。

歯科衛生士から**いち押し!**の声

色ははっきりしているので口腔内で操作がしやすく、ナイロン部との境目が分かりやすい。

色つき部分 (挿入部分) が硬くて、挿入しやすい。

臨床例

誰にでも扱いやすいので、セルフケアにもオススメ!



少数歯の場合は $\frac{1}{2}$ にして、太さが必要な時は2重にして使えます。