

本剤はこの添付文書をよく読んでからご使用ください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

医療用品4 整形用品 一般医療機器 液体包帯 JMDN コード：33584000

バトラー マウスベール お口の液体絆創膏

【禁忌・禁止】


〈適用対象（患者）〉

本剤又は本剤の成分にアレルギーがある患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

(1) 全体図：

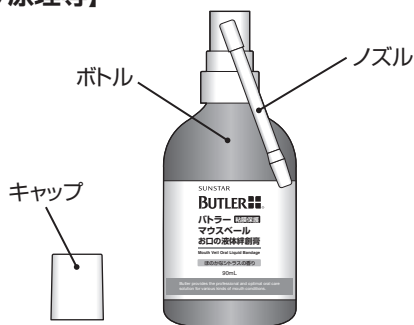

(2) 内容液の性状：無色～淡黄色の液で、わずかに粘性がある

2. 原理

口腔粘膜に付着し、傷口を覆って保護します

3. 成分・原材料

〔内容液〕


水、ポリビニルピロリドン、タウリン、グルコン酸亜鉛、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、サッカリン Na、プルラン

【使用目的】


口腔内粘膜の傷口を一時的に保護するために使用します

【使用方法等】

1. キャップを外し、ノズルを装着します。
(ノズルは 360°回転します)

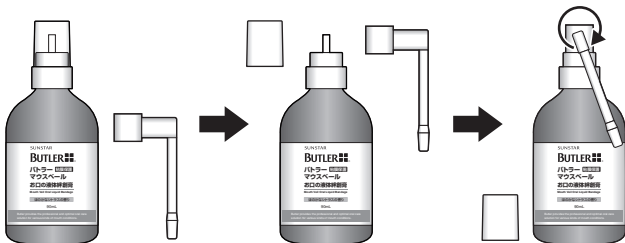

- 最初に本剤を使用する際は、紙や布などに数回プッシュして内容液が均一に噴射されることを確認してください。
- ノズルを口腔内の傷口に向け、1回に3噴射、1日3回使用します。
- 使用後は紙や布などでノズルの先端をふき取ってください。
- 塗布後1時間は飲食を控えてください。

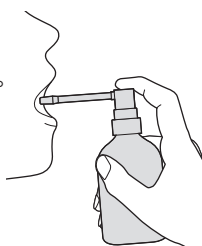

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本剤は他の人と共用しないでください。
- スプレー時はノズルの先端が口腔粘膜に直接触れないようにご使用ください。
- こどもに使用する場合は、保護者等の監督の下に使用するか、大人が操作してください。
- 連続して30日を超えて使用しないでください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本剤の使用途中又は使用後に発疹・発赤や過敏症（アレルギー症状）があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 噴射の際、薬液が目に入らないようにご注意ください。万が一、目に入った場合には、すぐに水で洗ってください。目の違和感が続くときは、眼科医の診療を受けてください。

2. 不具合・有害事象

本剤の使用による有害事象：嘔吐、悪心（吐き気）、口の刺激感、口の不快感

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- こどもの手の届かない所へ保管してください。

2. 有効期間

製造後3年間（自己認証（当社データ）による）
箱底面及び本体ラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

サンスター株式会社
〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1

〔商品のお問い合わせ〕

サンスター株式会社 お客様相談室
電話：0120-102330

〔製造業者〕

BMG Pharma S.p.A.
国名：イタリア