

BUTLER ®

症例集

ハブラシ
タフトブラシ
デンタルフロス

SUNSTAR

セルフケアとプロフェッショナルケアをつなぐ



Self care

Professional care

伝わらない想いを、伝わる言葉に。

あなたと患者さんをつなぐ。

「数字」で変わる、新しいコミュニケーション。



Toothbrush

歯肉の状態に合わせて選ぶハブラシ

みがきやすさを追求したハブラシ設計と、患者さんの歯肉の状態に合わせて選択できるラインナップで適切なブラッシング指導をサポートします。

健康な歯肉の方	歯肉炎の方	歯肉退縮や知覚過敏が気になる方
 Bケア (S/M) 00  しっかりプラーク除去	 Gケア 01  弱った歯肉もやさしい力でプラーク除去	 Gケア プラス 02  デリケートな部位もやさしくケア

※各ハブラシの毛の材質や毛先加工等は裏面にてご確認いただけます

Pick Up

Gケア・Gケアプラス


歯面・歯肉へのあたり・使用感

01 Gケア 極細テーパード毛

極細毛先が隅々まで入り込み、やわらかく弾力のある毛がしっかりとプラークを除去します。

歯肉縁下への毛先到達性

極細に加工した毛先が、テーパード毛(Bケア S)よりも**1.7倍**深くまで入り込みます。

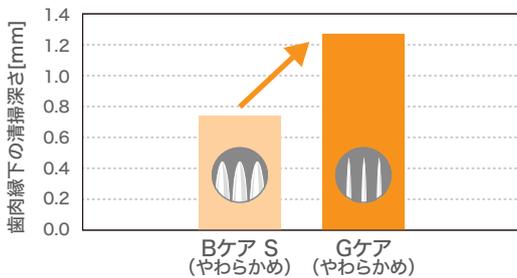


※ブラッシングマシンと顎模型を用い、横磨き(ブラッシング圧150g、時間2sec/1歯)で試験し、1歯を取り出して縁からの距離を計測(N=3)

02 Gケア プラス 先端3本毛

先端超極細加工の特殊毛が、デリケートな歯肉・歯面にやさしくあたりプラークを除去します。

歯科衛生士による使用感評価

「毛先のあたり方」や「知覚過敏等を伴うデリケート部へのブラッシング指導での採用」についてご好評いただきました。

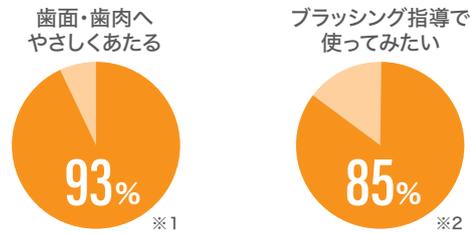

※使用感評価は5段階評価で実施。結果は「そう思う」「ややそう思う」の合計値で表記。

※1: Gケア プラスを使用して毛先の歯面・歯肉へのあたり評価

※2: デリケートな部位のブラッシング指導へ採用意向 (2023年 サンスター調べ、Gケアプラスを使用 歯科衛生士 N=13)

シリーズ共通 ヘッド&ネック

舌側など狭い部位でも動かしやすい**超薄型ヘッド**

臼歯部へも無理なく届くスリムな**ロングネック**



すべりにくく持ちやすい**六角形状ハンドル**

シリーズ共通 ハンドル

ハンドルは、ペングリップでもパームグリップでも滑りにくく持ちやすいラバーがついた六角形状。ハンドルの持つ位置を1面分ずらすだけで、ハブラシの角度を変えることができ、歯面に対する毛先のあたりを調整できます。

ハンドルの起点 (咬合面とした場合)

イメージ図



起点から少し傾けた場合

イメージ図



毛先が歯肉にあたり「みがいた感覚」を与えるが、毛先は歯面に当たっていない

起点から1面分ずらした場合

イメージ図



毛先が歯面にあたり、プラークを除去できる

Dental Floss

目的・用途で選ぶフロス

BUTLERのフロスは、チェアサイドでのケアからホームケアまでニーズに合わせて3つのフロスを提案。診療補助から患者指導まで幅広くサポートします。

Self-care セルフケアツール

エキスパンディング ワックス

しっかり膨らみ効率的にプラーク除去



POINT

フロス初心者にもやさしいセルフケアのためのフロス。

ワックス加工だから、コンタクト通過もスムーズ。
唾液で膨らむ特殊ナイロン糸が、効率よく歯間のプラークを絡めとります。

カンタン操作でフロス初心者へもおすすめ


コンタクト通過性がよく、唾液でしっかりフロスが膨らんで歯間にフィットするため、フロスを前後に動かすか、フロスを抜き出すだけで簡単にプラークが除去できます。

※通常のフロス操作ができる場合は、両面の歯面にフロスを沿わせ上下にスライドさせてご使用ください



最大15倍に膨らむ特殊ナイロン糸

使用中にフロスが唾液で膨らみ、やわらかくクッション性のある糸へ変化。歯肉にやさしく効率的にプラークを絡めとります。

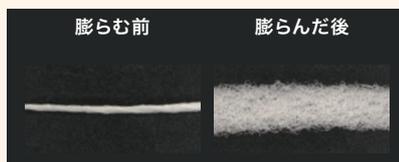

Professional care プロフェッショナルケアツール

オリジナルボンディング

隣接面などの診査向けフロス



POINT

あらゆる場面で活躍するプロフェッショナルのためのフロス。

ほつれにくく、毛羽立ちにくい特殊ナイロンコーティングを採用。

細い糸から成るフロスのため、きついコンタクトや歯肉縁下へもなめらかに挿入できます。

プラーク除去だけでなく、隣接面う蝕の早期発見や、補綴装置のコンタクト状況の確認など評価用としてもおすすめです。


バトラー特殊コーティングフロス

コーティングイメージ



糸が残りにくい

ほつれにくく毛羽立ちにくいから、使用時にフロスが切れても歯間で糸が残りにくい。

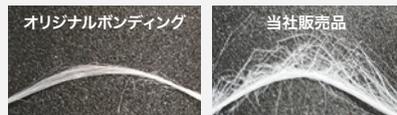

※紙やすりを用い、約100gの荷重で評価

歯肉への負担軽減



糸が細いので、歯肉縁下へ挿入しても歯肉が変色しない。
太いフロスを無理に歯肉縁下へ挿入すると歯肉に負担が掛かり白く変色する。

イージースレッド アンワックス

補綴周囲などプロフェッショナルケアに



POINT

ブリッジや矯正装置周囲、インプラント部にも使いやすいフロス。

歯間に通しやすい糸通し(スレッド)付き。糸通し部分は、唾液でよれにくいよう表面をコーティング。

フロス部は、スポンジ状のやわらかい特殊ナイロン糸で狭い部分のケアも圧迫刺激が少なくやさしくケアできます。

開けやすく、取り出すときにフロスが絡まらず、巻き戻してフロス残量が確認できる高機能ケース入り。

3つの特徴でプロフェッショナルケアをサポート


使いやすさ

口腔内での視認性がよく
ほどよい固さで通しやすい糸通し



使用感

ふわふわ触感のやさしいフロスが
心地よくプラークを除去

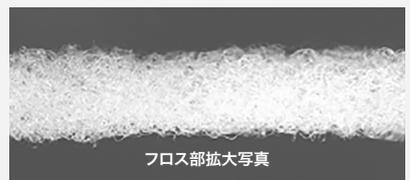

フロス部拡大写真

効率性



- ・1本ずつ切り出して使用できるケース入り
- ・長さ調整が可能な巻き戻し機能付き

Case 1 しっかりプラークを除去して、最後臼歯遠心までアプローチ

症例 20代 女性

現状

下顎前歯に軽い歯肉炎が認められるものの、口腔衛生習慣は習慣化できており、おおよそプラークコントロールは良好。

課題

プラークコントロール状態は良いものの、右上8番が頬側に傾斜し萌出しており、頬側および遠心部のブラッシングが難しい。



指導ポイント

タフトブラシ等の導入以前に、まずはハブラシでのプラークコントロールを目指し、最後臼歯遠心部まで無理なく届くハブラシを提案。

Toothbrush Bケア S

プラーク除去が期待でき、かつ奥まで届きやすい

00



ヘッド部分が頬粘膜を圧迫することなく右上8番遠心部までしっかり届く。
下顎前歯部に炎症部が認められるため、毛のかたさはやわらかめを選択。

Case 2 弱った歯肉部へフィットし、やさしい力でプラーク除去

症例 20代 女性

現状

上下前歯部に叢生が認められる。口腔衛生習慣は確立しており、おおよそプラークコントロールは良好。

課題

叢生部のプラークコントロールが難しく、部分的に歯肉の炎症が認められる。



指導ポイント

炎症を伴う叢生部のプラークコントロール向上を期待して、凹凸部へ毛先がフィットしプラークが除去できるハブラシへ変更。

Toothbrush Gケア

毛がしなり凹凸部へ毛先がフィットするGケアを選択。

01



極細に加工された毛先が叢生部へもしっかりフィット。
やわらかめのため、炎症が気になる歯頸部のプラークも無理なく除去できる。

Case 3 刺激を最小限に、デリケート部位のケア

症例 60代 男性

現状

左上345に歯肉退縮が認められる。口腔衛生習慣は確立しており、プラークコントロールは良好。

課題

左上45は根面が露出し、オーバーブラッシングが認められる。更なる歯肉退縮を招かないよう、辺縁歯肉への刺激に配慮したブラッシングが必要。



指導ポイント

炎症部のプラークコントロールが必要なため、オーバーブラッシングを考慮し、歯面へのあたりがやさしいハブラシへの変更を提案。

Toothbrush Gケアプラス

特殊加工の毛先が歯肉・歯面へやさしくあたるGケアプラスを選択。

02



毛先の先端はわずか40μmと超極細。歯面へのあたりがやさしいため、ブラッシング時の歯肉・歯面への刺激軽減が期待できる。


Case 4 矯正装置周囲や叢生部など狭い部分へのアプローチ

Toothbrush Bケア・Gケア・Gケア プラス

矯正装置周囲や叢生部、狭窄歯列や口腔前庭が浅い方、骨隆起付近など複雑な口腔内では、細部までハブラシをあてることが難しいため、無理なく届くハブラシを提案。
タフトやフロスも併用しながらプラークコントロールをサポート。



隅々まで無理なく届く

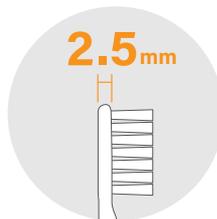

Bケア・Gケア・Gケア プラスはすべてヘッドの厚みがわずか2.5mm。ヘッドの高さ・幅ともにコンパクトで圧迫感が少ない。狭い部位へもヘッドが無理なく届く。


歯肉の状態に合わせて毛先を選ぶ



健全歯肉
Bケア(S・M)



歯肉炎の方
Gケア

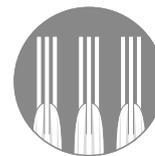

歯肉退縮の方
Gケア プラス

Tuft Brush ポイントケア S / M / MH

円錐カットが窪み部分にフィット、確実なプラーク除去をサポート



ギュッと詰まった円錐型の毛先が窪みにフィット



反り返りネックで臼歯部の孤立歯へ無理なく届く

- ・安定感のある束感と凹凸ヘブラシ部が沿う円錐型カット。
- ・反り返りネックがブラッシングをサポート。
- ・清掃部位の状態に合わせ、S(やわらかめ)、M(ふつう)、MH(かため)から毛のかたさが選べる。



Dental Floss オリジナル ボンディング

極細フロスで、きついコンタクト部もスムーズに通過



- ・コンタクトがきつい叢生部へも無理なく通過。
- ・ほつれにくく、毛羽たちにくいため、糸が切れてもフロス繊維が残りにくい




Case 5 インプラント周囲・補綴装置周囲

Tuft Brush マージナルケア S

フラットカットだから、毛先が広がりやさしくフィット

- ・フラットカットの毛先が、ラバーカップのように広がり清掃部へフィット。
- ・インプラントを含む補綴装置周囲の歯頸部などやさしくケア
- ・反り返りネックがブラッシングをサポート。

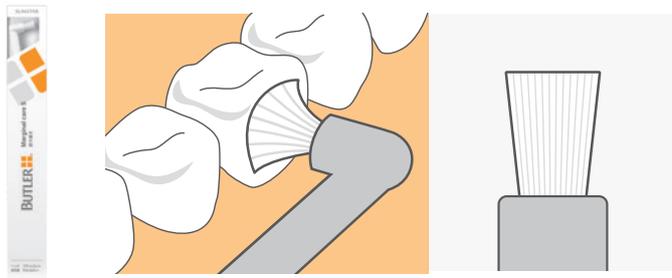

Dental Floss イージースレッド アンワックス

補綴装置周囲の隙間にも挿入しやすいスレッド付(糸通し)

- ・スレッド部付でインプラントや矯正装置周囲などのケアをサポート。
- ・フロスはアンワックスのスポンジ状フロスで、歯肉へのあたりもやさしい。



information

サンスター財団附属千里歯科診療所

本症例集は、サンスター財団附属千里歯科診療所の協力の下、作成しました。
“100年mouth100health”を目指し、歯科医師・歯科衛生士、スタッフ一丸となって患者さんに応じた対応を心がけ、日々診療を行っております。



クラブサンスタープロ

商品紹介や、動画・リーフレットなどのコンテンツ、セミナー案内やサンプル請求など臨床のお役に立つ情報をご紹介します。
BUTLERブランドページも合わせてご利用ください!



型番		Bケア S	Bケア M	Gケア	Gケア プラス	ポイントケア S	ポイントケア M	ポイントケア MH	マージナルケア S
ヘッド形状 植毛パターン イメージ									
ヘッド部	幅(最大部)mm ^{※1}	8.5	8.5	8.5	8.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	厚さ(最大部)mm ^{※1}	2.5	2.5	2.5	2.5	9.5	9.5	9.5	9.5
植毛部	列	3	3	3	3	1	1	1	1
	行	7	7	7	7	1	1	1	1
	タフト数	20	20	20	20	1	1	1	1
	長さ(最大部)mm ^{※1}	17.5	17.5	17.5	17.5	4.0	4.0	4.0	4.0
	幅(最大部)mm ^{※1}	6.5	6.5	6.5	6.5	4.0	4.0	4.0	4.0
	毛丈(最大部)mm ^{※1}	9	9	10	11.5	8.5	7.5	7.5	7.5
用毛	毛切形状	フラット	フラット	フラット	フラット	コーン	コーン	コーン	フラット
	毛先の種類 ^{※2}	テーパード	テーパード	極細テーパード	先端3本毛				
	毛の材質	ナイロン	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂 /ナイロン	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂
	太さ	0.15	0.19	0.15	0.20	0.09	0.10	0.15	0.09
毛のかたさ (使用感の 目安) ^{※3}	かため								
	ややかため							●	
	ふつう		●				●		
	やややわらかめ	●		●	●	●			●
	やわらかめ								

※1 長さ、幅、厚さ、毛丈は0.5mm単位で記載。

※2 当社の毛先の種類は4種類。

※3 毛のかたさ(使用感の目安)は、実際の使用感に基づいた当社独自の測定方法の結果をもとに記載。

		エキスパンディング ワックス	オリジナル ボンディング	イージースレッド アンワックス
主な用途		セルフケア用	プロフェッショナル用	ブリッジ、矯正、インプラントケア用
特徴	歯垢除去	◎	○	◎
	歯肉へのやさしさ	◎	○	◎
	歯間挿入性	◎	◎	—
適用場面	PCT	◎	○	◎
	セメント除去	△	◎	—
	補綴物 コンダクト確認	△	◎	—
	カリエチェック	○	◎	—

バトラーハブラシ	毛のかたさ	希望患者価格(税込)/本	内装入数(本)	ハンドルカラー
Bケア S	やわらかめ	363円	12	
Bケア M	ふつう	363円	12	
Gケア	やわらかめ	396円	12	
Gケア プラス	ふつう	396円	12	
バトラータフトブラシ	毛のかたさ	希望患者価格(税込)/本	内装入数(本)	ハンドルカラー
ポイントケア S	やわらかめ	297円	12	
ポイントケア M	ふつう	297円	12	
ポイントケア MH	かため	297円	12	
マージナルケア S	やわらかめ	385円	12	
バトラードENTALフロス	フロス表面の加工	希望患者価格(税込)/個	内装入数(個)	ハンドルカラー
イージースレッド アンワックス	アンワックス	1,045円	6	—
オリジナル ボンディング	アンワックス	495円	6	—
エキスパンディング ワックス	ワックス	550円	6	—

製品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-0806
大阪府高槻市明田町7-1
TEL:072-682-4733(受付時間:平日9:00~17:00)
FAX:072-684-5669

Club Sunstar Pro

サンスターと医療従事者の声でつくる会員サイト
商品情報はClub Sunstar Proからもご覧いただけます。

