


# ブラッシングレシピ

お口の中をチェックしましょう

年 月 日

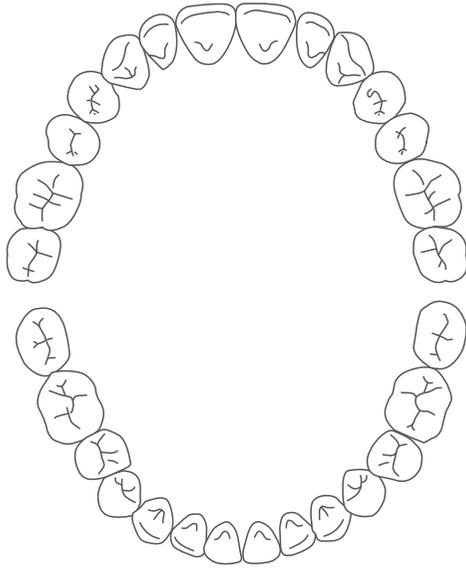

コメント

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

✓ おすすめのケア用品は…

- デンタルフロス     歯間ブラシ

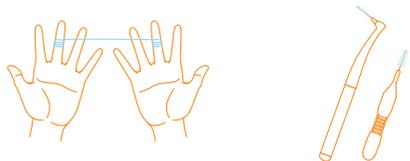

歯科医院取扱品

## バトラー デンタルフロス



イージースレッド アンワックス    エクスパンディング ワックス    オリジナル ボンディング

商品名	タイプ	内容
バトラー デンタルフロス イージースレッド アンワックス	アンワックス	50回分
バトラー デンタルフロス エクスパンディング ワックス	ワックス	45.7m
バトラー デンタルフロス オリジナル ボンディング	アンワックス	40m

歯科医師・歯科衛生士の指導のもとご使用ください。

当医院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市明田町7-1  
お客様相談室

☎ 0120-008241

®登録商標。BUTLERは登録商標です。



2503SK作成

SUNSTAR

BUTLER

## バトラー デンタルフロス

いつものブラッシングに加えて  
選べる3タイプで歯間部を“集中ケア”



イージースレッド アンワックス



エクスパンディング ワックス




オリジナル ボンディング

プラーク(歯垢)は

## 歯間部にたまりやすい

ハブラシでみがくだけでは歯と歯の間のプラーク(歯垢)を落としきることはできません。ハブラシと歯間清掃具の併用が、歯と歯の間のプラーク(歯垢)除去には効果的です。

### 歯間部プラーク(歯垢)の除去率

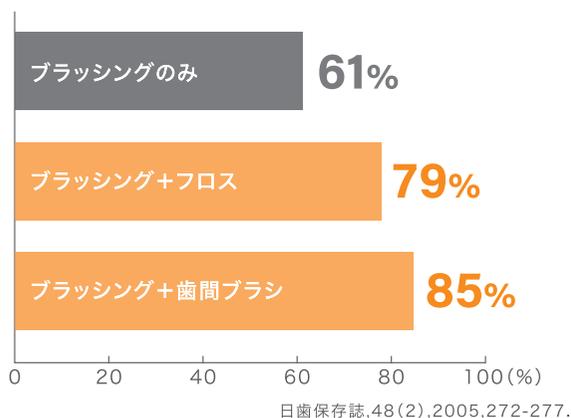


### プラーク(歯垢)のたまりやすい部位




#### POINT

特に歯と歯の間は狭くてプラーク(歯垢)がたまりやすく、そのうえハブラシではみがきにくい場所。フロスで、正しくしっかりみがきましょう。

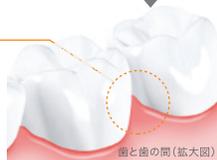

## イージースレッド アンワックス

矯正装置や歯の詰め物の隙間に挿入しやすいスレッド付(糸通し)

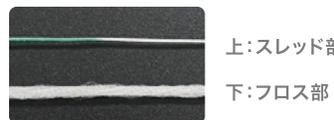

多数の繊維から成る膨らんだフロスが歯面にフィットし効果的にプラークを除去



矯正装置のや歯の詰め物のすき間にスレッドを通し、フロス部分で清掃します。

### イージースレッドフロスの使い方

#### STEP 1

スレッド部(緑)まで、フロスを引き出します。



#### STEP 2

次のスレッド部(緑)でカットします。

残量が見えます!



#### STEP 3

巻き戻し機能付き。

※フロスが入り込んだ際は、フロスケースを開けてフロスを出してください。

出しすぎてもOK



## エキスパンディング ワックス


ワックス加工の膨らむフロスが歯間にフィットし効果的に清掃します



使用中にフロスが膨らみ、プラークを効果的に除去します。



膨らんだフロスを見てみよう!

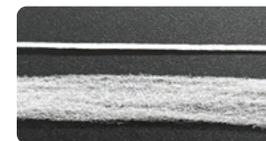

膨らむ前  
(ワックスが取れる前)

膨らんだ後  
(ワックスが取れ膨らむ)

## オリジナル ボンディング

極細糸でコンタクトきつい部分も通過し、ボンディング加工で切れにくいフロス



歯間部が狭い方にもお使いいただけます。

ボンディング処理とは

表面をナイロンポリマーでコーティングし、フィラメントを束の状態で固める処理。フロス自体が切れにくくなりました。