

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN70904000

## オーラツー PMTC ペースト

### 【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本材又は本材に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

青色の均質なペースト状

〔成分〕

無水ケイ酸、ソルビット液、濃グリセリン、ポリエチレングリコール、ラウリル硫酸塩、香料、パラベン、青色1号、その他。

〔原理〕

コントラアングルハンドピースなどの回転装置に接続したポリッシングブラシやラバーカップなどを用いて、歯面を擦過することにより、歯面の清掃及び研磨を行う。

### 【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師らが、歯面の清掃（ステインなどの除去）及び研磨（歯面滑沢化など）を行うために用いる。

### 【使用方法等】

本材の適量を、コントラアングルハンドピースなどの回転装置に接続したポリッシングブラシやラバーカップなどにとり、歯面を清掃及び研磨する。その後、口腔内を水などで洗浄し、本材を除去する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) コントラアングルハンドピースなどの回転数は、ブラシやカップなどのメーカーの指示に従って設定すること。ただし、高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがあるので、 $5000\text{min}^{-1}$  以下で使用すること。
- 2) ブラシやカップを、無理な角度や過度の加圧で使用しないこと。

### 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材の使用により、発疹、発赤、かゆみ、腫れなどの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。
- 2) 本材の使用時は、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡などを使用すること。
- 3) 万一目に入った場合には、すぐに水でじゅうぶんに洗浄し、眼科医を受診させるなど適切な処置を行うこと。
- 4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

室温で保管すること。

〔有効期間〕

製造日より3年。(自己認証(当社データ)による。)  
(製造日はチューブ及び外箱に製造番号として記載。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号

〔商品のお問い合わせ〕

医薬品インフォメーションセンター

電話番号 072-682-4815